

 Consultare le istruzioni per l'uso

Thealoz Duo

Protezione, idratazione e lubrificazione degli occhi nel trattamento della sindrome da occhio secco, di entità da moderata a grave

Flacone ABAK® – Senza conservanti.

COMPOSIZIONE:

Trealosio.....3g
Ialuronato sodico0,15g
Cloruro di sodio,
Trometamolo, Acido cloridrico,
Acqua per preparazioni iniettabili.....
.....a 100 ml

NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE:

Laboratoires THEA
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand -
Cedex 2
FRANCIA

INDICAZIONI:

THEALOZ DUO contiene una soluzione da somministrare mediante instillazione nell'occhio o su lenti a contatto. THEALOZ DUO è raccomandato in caso di fastidio, bruciore o irritazione degli occhi. Tali sintomi possono essere causati da fattori esterni come per esempio vento, fumo, inquinamento, polvere, esposizione al sole o al freddo, caldo secco, aria condizionata, viaggi in aereo, lavoro protratto di fronte allo schermo del computer ecc.

THEALOZ DUO non contiene conservanti e assicura il rispetto ottimale dei tessuti oculari: per questo può essere usato anche da chi porta lenti a contatto, indipendentemente dal tipo di lenti. Dà sollievo immediato, che dura tutto il giorno.

PROPRIETA':

THEALOZ DUO è una soluzione oftalmica acquosa ipotonica e con pH neutro, senza conservanti. Gli ingredienti principali sono trealosio, un disaccaride presente in molte piante e animali, e ialuronato sodico, un polisaccaride naturalmente presente nell'occhio.

Le caratteristiche chimico-fisiche del trealosio conferiscono al prodotto proprietà protettive, antiossidanti e idratanti. Per tutti questi motivi è un elemento essenziale nel meccanismo dell'anidrosi osservato in alcuni micro-organismi (metabolismo rallentato che consente loro di sopravvivere alla disidratazione estrema).

Il trealosio ha anche proprietà protettive e stabilizzanti delle membrane cellulari, prevenendo la denaturazione delle proteine e la degradazione dei lipidi, come pure proprietà antiossidanti.

Lo ialuronato sodico è un polisaccaride naturale presente nell'occhio umano con proprietà uniche di ritenzione dell'acqua. Le notevoli proprietà di ritenzione dell'acqua garantiscono una migliore idratazione e lubrificazione della superficie corneale. Inoltre le caratteristiche bioadesive consentono una migliore aderenza del prodotto alla superficie oculare, dando sollievo a lungo e accorciando i tempi di guarigione dell'epitelio corneale.

Grazie all'abbinamento unico di Trealosio e ialuronato sodico, THEALOZ DUO protegge, idrata e lubrifica a lungo la superficie oculare, per il massimo comfort. Per garantire la massima tollerabilità, THEALOZ DUO non contiene conservanti grazie al flaconcino ABAK® multidose. Questo dispositivo nuovo e brevettato consente la somministrazione

di gocce oculari attraverso una membrana filtrante da 0.2 µm, che impedisce le contaminazioni batteriche della soluzione. La soluzione rimane quindi protetta e può essere usata per periodi fino a 3 mesi dopo l'apertura.

AVVERTENZE SPECIALI E PRECAUZIONI SPECIALI PER L'USO:

- Non usare in caso di allergia a uno dei componenti.
- Non toccare la superficie dell'occhio con la punta del flaconcino.
- Non iniettare e non inghiottire.
- Non usare il prodotto se l'anello di sicurezza è danneggiato.

TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

INTERAZIONI:

In caso di applicazione di due prodotti oculari diversi, si raccomanda un intervallo di almeno 10 minuti.

COME USARE IL PRODOTTO:

METODO E VIA DI SOMMINISTRAZIONE:

INSTILLAZIONE OCULARE.

- Lavarsi bene le mani prima dell'uso,
- Evitare di toccare gli occhi o le palpebre con la punta del flaconcino, soprattutto se si pensa di avere un'infezione agli occhi,
- Instillare una goccia nella sacca congiuntivale inferiore, tirando delicatamente verso il basso la palpebra inferiore e guardando verso l'alto,
- Rimettere il tappo dopo l'uso.

DOSAGGIO:

1 goccia in ogni occhio, 4-6 volte al giorno.
THEALOZ DUO può essere usato anche indossando le lenti a contatto.

Confezione adatta per uso prolungato e quotidiano.

EFFETTI COLLATERALI INDESIDERATI (EFFETTI AVVERSI):

Rara possibilità di lieve irritazione agli occhi.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:

Dopo l'apertura, non tenere il flaconcino per più di 3 mesi.

Conservare il prodotto a temperatura inferiore a 25°C.

NON USARE IL PRODOTTO DOPO LA DATA DI SCADENZA INDICATA CHIARAMENTE SULLA CONFEZIONE.

La data di scadenza si riferisce al prodotto nella confezione integra e conservato correttamente. Non usare il flaconcino se è danneggiato.

ISTRUZIONI AGGIORNATE AL: 02/2013

STERILE A



CE 0459

Théa

NZ762C15LIT/0319